




EAC



СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

модель СУЛ 1.0 ЭЛЕМЕНТ

**Этикетка
АВЕ 543.000.000 ЭТ**

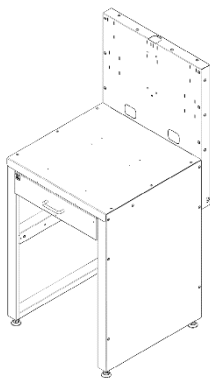

Декларация о соответствии
ТС № RU Д-RU.AY04.B.54749 от 19.09.2016

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель СУЛ 1.0 ЭЛЕМЕНТ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Стол универсальный лабораторный СУЛ 1.0 ЭЛЕМЕНТ (далее **СУЛ**) – предназначен для организации рабочих мест в зуботехнических и литейных лабораториях. ТО 5621-39-5233 1864-2016.

1.2 Условия эксплуатации

окружающая температура 10...35°C
влажность при 25°C, не более 80%

1.3 Основные технические характеристики

максимальная нагрузка на столешницу 100 кг
масса, не более 25 кг
габариты.....575×610×1290 мм
столешница: - ширина, не более 565 мм
 - глубина, не более 550 мм
 - высота над уровнем пола, не более 830 мм

1.4 Особенности

- многофункциональная задняя стенка с пазами для навешивания подставок и держателей 60 мм, заглушки для использования с НАБОР 2.0 ПАЙКА/НАБОР 7.0 ВЕРСИЯ (при формировании закрытой рабочей зоны). Заглушки при необходимости вскрываются вручную;

- возможность установки:

- **поставка по дополнительной заявке***

- светильника ЛЮКС ЛЕД ПЛЮС;
- дополнительных полок;
- НАБОРА 2.0 ПАЙКА - комплект дополнений к **СУЛ** с целью организации рабочего места для паяльных работ;
- НАБОРА 7.0 ВЕРСИЯ - комплект дополнений к **СУЛ** с целью организации рабочего места для литейных работ;
- электровакуумной печи ЭВП, литейной установки УЛП, установки для изготовления изделий из пластмасс методом термического прессования ТЕРМОПРЕСС АВЕРОН;
- печи типа ЭМП ЦИРКОН для синтеризации, фрезеров, принтеров, сканеров на основе САД/САМ технологий с учетом габаритов и веса оборудования;
- а также другого зуботехнического оборудования с учетом его весо/габаритных характеристик;

- возможность соединения со столами серии МАСТЕР или другими **СУЛ** с помощью полок БРИДЖ/КОНЕР/ДЕЛЬТА, а также панелями БРИДЖ.

1.5 Комплектность – согласно Упаковочному листу.


Изготовитель в праве вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

* – эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей эксплуатационной документации.

2 УСТРОЙСТВО

- 1 — Столешница
- 2 — Стенка боковая левая
- 3 — Стенка боковая правая
- 4 — Стенка задняя многофункциональная
- 5 — Ящик выдвжной с ручкой

Крепеж установлен по месту

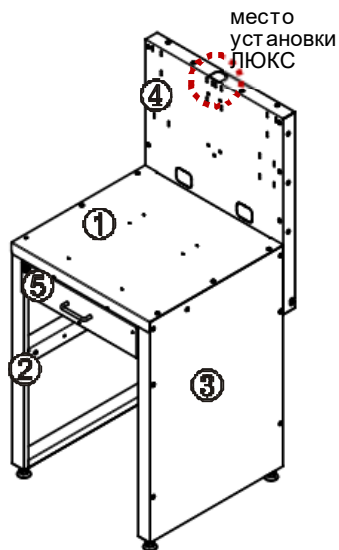

3 ПОРЯДОК СБОРКИ


Во избежание перекосов стол собирать на ровной поверхности в вертикальном положении.

Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).

Крепеж размещен в местах его установки. Не затягивайте крепеж до окончательной установки всех элементов конструкции СУЛ.

① УСТАНОВИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ

- столешницу (1) с боковыми стенками (2/3)
- заднюю стенку (4) со стенками (1/2) и столешницей (1)

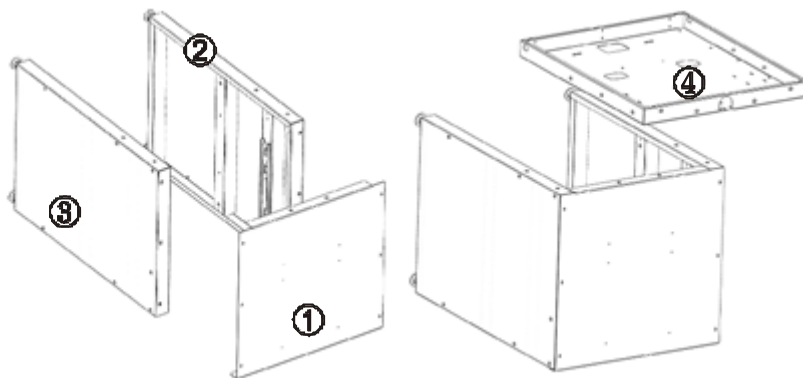


II

Закрепить ручку на ящике (5) винтами М4×8 с шайбами 4 и гайками.

Вставить ящик в направляющие, не допуская перекосы и чрезмерные усилия.

При движении ящика по шариковым направляющим может потребоваться дополнительное усилие в начале и конце хода.

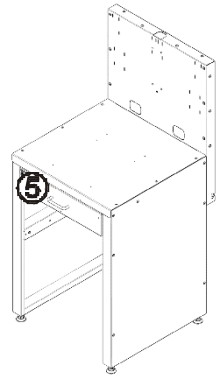

«Окна» в задней стенке используются для проводки кабелей или шлангов к рабочей зоне стола, применить подвязочную проволоку.

Пазы - для навешивания подставок и держателей 60 мм, заглушки вместо отверстий для использования с НАБОР 2.0 ПАЙКА/НАБОР 7.0 ВЕРСИЯ.

4 ДООСНАЩЕНИЕ (✉ - поставка по дополнительной заявке)

4.1 Крепление светильника ЛЮКС АВЕРОН.

4.2 Установка комплекта НАБОР 2.0 ПАЙКА.



5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

www.averon.ru

feedback@averon.ru